



## Press- und Brennparameter

<b>PRESSPARAMETER* AVANTÉ Z Pellets</b>	<b>100g Muffel</b>	<b>200g Muffel</b>
<b>Starttemperatur (T1)</b>	700°C	700°C
<b>Aufheizrate (R)</b>	60°C/min	60°C/min
<b>Presstemperatur (T2)</b>	870°C	870°C
<b>Haltezeit (H1)</b>	10min	15min
<b>Presszeit (H2)</b>	12min	12min

<b>AVANTÉ Z Brennparameter*</b>	<b>Avanté Z Stain</b>	<b>1.Dentin</b>	<b>2.Dentin</b>	<b>Glanz- brand</b>	<b>Glanzbrand mit Glaze</b>	<b>Korrektur</b>
<b>Vorwärmen</b>	6min	8-10min	6-8min	6min	6min	6min
<b>Starttemperatur</b>	425°C	425°C	425°C	425°C	425°C	425°C
<b>Vakuum Start</b>	480°C	480°C	480°C	----	480°C	480°C
<b>Aufheizrate</b>	55°C/min	55°C/min	55°C/min	55°C/min	70°C/min	40°C/min
<b>Vakuum Ende</b>	1000°C	800°C	785°C	----	765°C	770°C
<b>Endtemperatur</b>	1000°C	855°C	840°C	820°C	765°C	770°C
<b>Haltezeit</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Kühlen</b>	0	0	0	0	0	0

\*Die angegebenen Press- bzw. Brennparameter sind Richtwerte. Abweichungen um bis zu 15°C sind bedingt durch verschiedene Ofentypen und deren Einstellung.



**Haben Sie noch Fragen?**

**Tel.: 0800 53 63 742**